

# 一次性使用病毒采样管

## UNIVERSAL TRANSPORT MEDIUM

适用于新冠病毒病毒、流感、禽流感、手足口病、麻疹等病毒样本的收集、运输和储存等，由含样本保存液（灭活型）的PP管及配套用植绒拭子组成。




### 单管

5mL管  
3mL灭活样本保存液  
1支拭子



### 5混/10混

10mL管  
6mL灭活样本保存液  
5支拭子/10支拭子

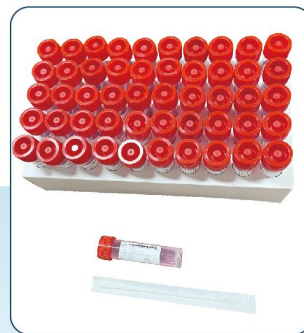

### 20混

30mL管  
12mL灭活样本保存液  
20支拭子


### 产品信息

产品名称	一次性使用病毒采样管
品牌	郑州智捷
产品备案号	豫郑械备20220292号
生产备案号	豫郑食药监械生产备20200056号
用途	灭活病毒，完成病毒样本的收集、运输和储存
型号	型号齐全，有单采、5混、10混、20混
包装规格	多种包装规格，可选择性强


### 产品特点

稳定性	内含特殊稳定成分，病毒保存高效完整
准确性	保存液含核酸酶Rnase抑制剂，有效保护病毒核酸稳定，确保结果准确
安全性	医用材料、杜绝渗漏，保证生物安全
方便性	一次性独立包装，常温运输、无需冷藏

### 操作步骤

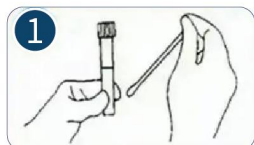

根据不同的采样要求，用采样拭子在相应的部位采样

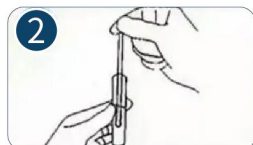

将采集样本之后的拭子放置到采样管中



将拭子放置入保存液，从折断点折断



拧紧一次性使用病毒采样管盖

# 样本保存液

## PRESERVATIVE SOLUTION

用于组织、细胞病理学分析样本的保存，  
有ZJ-VTM(灭活型)和ZJ-VTM(非灭活型)两种型号



### 产品信息

产品名称	样本保存液	用途	用于组织、细胞病理学分析样本的保存
品牌	郑州智捷	型号	灭活型、非灭活型两种
产品备案号	豫郑械备20220358号	包装规格	多种包装规格，可选择性强
生产备案号	豫郑食药监械生产备20200056号		

### 灭活型样本保存液产品特点



#### 质量好，高效稳定

保存病毒核酸效果好，室温保存2年病毒核酸保存能力不变。

保存液内含核酸酶Rnase抑制剂，能有效抑制细胞中核酸酶对病毒核酸的降解，最大程度保护病毒核酸稳定，从而提高核酸提取效率。



#### 灭活效果好，生物安全

胍盐含量高(约0.9mol/L)，采样后迅速灭活病毒，使其失去感染活性的同时保持蛋白结构完整。



#### 分散性好

保存液内含表面活性剂，具有促进破菌的能力，提高分散性，利于病毒核酸的提取。



#### 生产环境好

万级无尘净化车间生产，产品品质高。



#### 生产原料好

精选生物级试剂原料，所用水为超纯水，RNA保存效果更好。